

Masque

grand public

Références CHANTELLE : CA6110 - CA6140
CA6120 CA6150 - CA6190 - CA6290 - CA6210
CA6220 CA6130 - CA6160 - CA6170 - CA6180



Chantelle
[LAB]

MASQUE GRAND PUBLIC DE CATEGORIE 1
[FILTRATION : 3 μ m \geq 90%] [AJUSTABLE]

MATIÈRES CERTIFIÉES
Oeko-TEX®
STANDARD 100



CATÉGORIE 1

Efficacité de filtration des particules
de 3 μ m > 90%, Perméabilité à l'air
> 96 L.m-2.s-1 (dépression de 100 Pa)

FR NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT :

POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ ET CELLE DES AUTRES, IL EST TRÈS IMPORTANT DE RESPECTER CETTE NOTICE D'UTILISATION.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant, ni à l'enfant de moins de 3 ans.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques de type FFP2).

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

AVANT DE LE METTRE :

- 1 Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- 2 Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
- 3 Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- 4 Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

POUR LE METTRE :

- 1 Tenez le masque par les lanières élastiques.
- 2 Placez-le au niveau de votre bouche.
- 3 Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- 4 Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.



LORSQUE VOUS LE PORTEZ :

- 1 Évitez de le toucher et de le déplacer.
 - 2 Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.
- IL FAUT CHANGER LE MASQUE :**
- 1 Quand vous avez porté le masque 4h.
 - 2 Quand vous souhaitez boire ou manger.
 - 3 Quand il devient difficile de respirer.
 - 4 Si le masque s'humidifie.
 - 5 Si le masque est endommagé.
 - 6 Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

POUR L'ENLEVER :

- 1 Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
- 2 Décollez les lanières élastiques pour décrocher le masque de votre visage.
- 3 En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
- 4 Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
- 5 Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

AVANT OUVERTURE :

- 1 Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

POUR LE LAVAGE :

- 1 Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
- 2 Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcooolique.
- 3 Au-delà du nombre de lavages testés la filtration du masque n'est plus garantie.
- 4 Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en reformant les plis sans forcer.

APRÈS LE LAVAGE :

- 1 Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
- 2 Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
- 3 Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.
- 4 Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

SÉCURITÉ

- 1 Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
- 2 La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

- 3 L'innocuité des masques est assurée grâce à la certification Oeko-Tex Standard 100 des matières utilisées.

Les performances des masques mesurées par les laboratoires de DGA Maltrise NRBC et les informations techniques sont disponibles sur le site CL-brands.com

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage.

Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

La responsabilité du fabricant ne peut être engagée en cas de mauvais suivi des recommandations d'usage du masque reprises par les présentes préconisations et détaillées par le référentiel AFNOR SPEC S'76-001 «Masques barrières» téléchargeable via le lien suivant :

<https://telechargement-afnor.org/masques-barrieres>

et pour la Belgique : voir le document technique NBN/DTT S 65-001:2020.

DÉCOMpte D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques pouvant être lavés 50 fois, chaque masque est donc utilisable 51 fois.